

a) stolice na průkaz enterotoxinu *Clostridium perfringens*:

Odběrová souprava:

parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou

Odběr:

minimálně 1 cm³ (velikost lískového ořechu)

b) potravina pro průkaz enterotoxinů A, B ,C ,D *Staphylococcus aureus* a *Bacillus cereus*

Odběrová souprava:

zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

zkumavka sterilní 10 ml

zkumavka skleněná s pryžovou zátkou

Odběr:

minimálně 20 g potravin

Poznámky:

- stanovení toxinu syndromu toxického šoku 1 *S. aureus*, exfoliativních toxinů A a B *S. aureus*, enterotoxinů *V. cholerae* a *E. coli* a verocytotoxinů *E. coli* je prováděno z izolovaného kmene v případě pozitivní kultivace na daný bakteriální druh. Požadavek na stanovení těchto toxinů je třeba vyznačit na žádance, případně konzultovat s laboratoří!