



### **a) stolice na průkaz enterotoxinu *Clostridium perfringens*:**

**Odběrová souprava:**

parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou  
zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

**Odběr:**

minimálně 1 cm<sup>3</sup> (velikost lískového ořechu)

### **b) výtěr z rektu pro průkaz enterotoxinů A, B ,C ,D *Staphylococcus aureus* a *Bacillus cereus***

**Odběrová souprava:**

transportní souprava s AMIES médiem a sterilním tamponem na plastové tyčince

**Odběr:**

minimálně 20 g potravin

**Poznámky:**

- stanovení toxinu syndromu toxického šoku 1 *S. aureus* a enterotoxinů je prováděno z izolovaného kmene v případě pozitivní kultivace na daný bakteriální druh. Požadavek na stanovení těchto toxinů je třeba vyznačit na žádance, případně konzultovat s laboratoří!