

Odběrová souprava: sterilní ústřížek filtračního papíru na krevním agaru

Odběr: ve sterilní rukavici nebo sterilní pinzetou se přiloží ústřížek sterilního filtračního papíru na rannou nebo popálenou plochu na cca. 10-15 sec. Poté se sejme a opatrně přiloží na UR půdu v misce.

Poznámky:

- semikvantitativní vyšetření
- sterilní filtrační papír (SYNPOR 5) a misky s UR půdou dodává na vyžádání laboratoř nozokomiálních nákaz Ostrava