



**Odběrová souprava:** sterilní ústřížek filtračního papíru na krevním agaru

**Odběr:** ve sterilní rukavici nebo sterilní pinzetou se přiloží ústřížek sterilního filtračního papíru na rannou nebo popálenou plochu na cca. 10-15 sec. Poté se sejme a opatrně přiloží na UR půdu v misce.

**Poznámky:**

- semikvantitativní vyšetření
- sterilní filtrační papír (SYNPOR 5) a misky s UR půdou dodává na vyžádání laboratoř infekcí spojených se zdravotní péčí