



## Virologická vyšetření

**Odběrové soupravy:** virologické odběrové transportní médium

**Odběr:** pokud se materiál odebírá z více lokalit, pak každý odděleně sterilními nástroji do samostatné nádoby, aby se zabránilo vzájemné kontaminaci různých tkání. Materiál odebrat v množství asi 1 cm<sup>3</sup>.

## Bakteriologická a mykologická vyšetření

*Vzorky na mykologická vyšetření zasílejte jako samostatný odběr, ne jako součást bakteriologického vyšetření!*

**Odběrové soupravy:** zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

**Odběr:** nutno provádět sterilními nástroji za snahy o redukci kontaminace doprovodné mikroflóry z okolních lokalit. Nutno zabránit po odběru přístupu vzduchu, aby bylo možno materiál kultivovat také anaerobně.

## Průkaz mykobakterií

**Odběrová souprava:** zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

**Odběr:** tkáň bez fixačního nebo transportního média (nejméně 3 x 3 mm)! Odebraná tkáň by měla být co nejrychleji doručena do laboratoře. V nevyhnutelných případech, kdy je možno odeslat tkáň až druhý den po odběru, je možno vzorek tkáně transportovat v malém množství sterilního fyziologického roztoku, aby bylo zabráněno přílišnému vyschnutí vzorku.