



**Odběrová souprava:** zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou

## **Virologická a imunologická vyšetření, průkaz mykobakterií, průkaz toxinů A/B a glutamát dehydrogenázy (GDH) *Clostridioides difficile*, toxinů *Clostridium perfringens***

**Odběr:** minimálně 1 cm<sup>3</sup> (velikost lískového ořechu)

### **Poznámky:**

- stolici pro virologická vyšetření nemrazit!
- odběr pro průkaz toxinů a GDH *Clostridioides difficile* – při pseudomembranózní enterokolitidě v souvislosti s podáváním antibiotik. Ze stejného vzorku stolice se provádí rovněž kultivace *C. difficile*, požadavek uveďte na žádance.

## **Parazitologická vyšetření**

**Odběr:** cca 10 ml (velikost vlašského ořechu) se odebere po defekaci. Veškeré pozorovatelné příměsi (krev, hlen, červi nebo jejich části) musí být zahrnuty do vzorku.

### **Poznámky:**

- vychlazená stolice na střevní parazity (vajíčka červů, cysty prvoků včetně kryptosporidií a mikrosporidií).
- čerstvá stolice na amébozu a trofozoity jiných prvoků (vzorek se nesmí chladit, ideální je tělesná teplota!).