



Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou

Virologická a imunologická vyšetření, průkaz mykobakterií, průkaz toxinů A/B a glutamát dehydrogenázy (GDH) *Clostridioides difficile*, toxinů *Clostridium perfringens*

Odběr: minimálně 1 cm³ (velikost lískového ořechu)

Poznámky:

- stolicí pro virologická vyšetření nemrazit!
- odběr pro průkaz toxinů a GDH *Clostridioides difficile* – při pseudomembranózní enterokolitidě v souvislosti s podáváním antibiotik. Ze stejného vzorku stolice se provádí rovněž kultivace *C. difficile*, požadavek uveďte na žádance.

Parazitologická vyšetření

Odběr: cca 10 ml (velikost vlašského ořechu) se odebere po defekaci. Veškeré pozorovatelné příměsi (krev, hlen, červi nebo jejich části) musí být zahrnuty do vzorku.

Poznámky:

- vychlazená stolice na střevní parazity (vajíčka červů, cysty prvoků včetně kryptosporidií a mikrosporidií).
- čerstvá stolice na amébozu a trofozoity jiných prvoků (vzorek se nesmí chladit, ideální je tělesná teplota!).