



## Šupiny kůže, nehtová drť, vlasy, vousy – mykologická vyšetření

---

### Odběrová souprava:

zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

zkumavka sterilní 10 ml

zkumavka skleněná s pryžovou zátkou

### Odběr:

#### 1. kožní šupiny

Kožní šupiny se odebírají seškrábnutím sterilním skalpelem. Materiál se získává především z okrajů ložisek, kde je infekční proces nejmladší.

#### 2. obsah puchýřků

Z akutních lézí s tvorbou puchýřků je třeba získat jejich krusty odstřížením malými nůžkami. Obsah puchýřků lze odebrat vatovým tampónem na tyčince po předchozím nabodnutí očkovací jehlou.

#### 3. nehty

Při odběrech z onychomykotických lézí je třeba získat částice z vnitřní, s nehtovým lůžkem související strany ploténky. Nejlépe je odstříhnout část distálního okraje nehtu a odstranit detritus ulpívající pod volnou částí ploténky. Sterilním skalpelem se pak seškrábe keratinová hmota z dostupné vnitřní části ploténky.

#### 4. vlasy, vousy

Vlasy nebo vousy se odebírají epilační pinzetou. Snažíme se vždy získat folikulární části vlasů, odběr stříháním vlasů nad úrovní pokožky je většinou bezcenný.