



## Žaludeční šťávy pro průkaz mykobakterií

---

**Odběrová souprava:** sterilní kontejner 120 ml

**Odběr:** 50-100 ml žaludeční sondou nalačno. U dětí se nechá vypít nalačno 50 ml sterilního fyziologického roztoku a obsah žaludku se pak odebere žaludeční sondou nebo se provede 50 ml sterilního fyziologického roztoku žaludeční výplach. Nemí-li možno vzorek doručit v průběhu 5 hodin do laboratoře, je nutno žaludeční laváž neutralizovat přidáním stejného objemu 10% vodného roztoku fosforečnanu sodného ( $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$ ), provést kontrolu pH indikátorem (pH 6,8-7,2).