



TYP VZORKU	DOPORUČENÁ ODBĚR. SOUPRAVA	TEPLOTA ÚSCHOVY VZORKU DO TRANSPORTU DO LAB.	DOBA TRANSPORTU DO LAB.	DOBA ODEZVY	POZNÁMKA	PROVÁDÍ SE	KONTAKT
výtěr z horních cest dýchacích (krk, nos, nosohltan, tonzily)	tampon v Amiesově transportním médiu	2-8 °C	≤ 24 hod.	3 -14 dnů		po - so	OV 596 200 357
sputum, BAL, aspirát	sterilní zkumavka 30 ml (sputovka)	2-8 °C	≤ 24 hod.	mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace 3-14 dnů		po - so	OV 596 200 357
líkvor	sterilní zkumavka	pokožová teplota	co nejrychleji	mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace 3-14 dnů		po - so	OV 596 200 357
hnisy, punktáty výpotek	stříkačka, sterilní zkumavka	2-8 °C	≤ 24 hod.	mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace 3-14 dnů		po - so	OV 596 200 357
výtěr z oka	sterilní tampon ve zkumavce	2-8 °C	≤ 24 hod.	mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace 3-14 dnů		po - so	OV 596 200 357
výtěr z ucha	tampon v Amiesově transportním médiu	2-8 °C	≤ 24 hod.	3 -14 dnů		po - so	OV 596 200 357
stěr z kůže, rány	tampon v Amiesově transportním médiu	2-8 °C	≤ 24 hod.	3 -14 dnů		po - so	OV 596 200 357
rektum	tampon v Amiesově transportním médiu	2-8 °C	≤ 24 hod.	3 -14 dnů		po - so	OV 596 200 357
tkáň	sterilní zkumavka s fyziologickým roztokem	2-8 °C	≤ 24 hod.	3 -14 dnů		po - so	OV 596 200 357
vyšetření genitálního ústrojí ženy sekret	tampon v Amiesově transportním médiu	2-8 °C	≤ 24 hod.	3 -14 dnů		po - so	OV 596 200 357
moč	sterilní zkumavka	2-8 °C	≤ 24 hod.	3 -14 dnů		po - so	OV 596 200 357
krev u septických stavů	hemokultivační lahvičky pro automatický systém BacT/ALERT	pokožová teplota při podezření na dimorfní houby teplota 35±2 °C	co nejrychleji	po signalizaci přístrojem je pozitivní mikroskopický nález sdělen ihned telefonicky/ aerobní kultivace v závislosti na nález do 14 dnů	konečný negativní výsledek po 7 dnech kultivace v přístroji a dalších 8 dnech kultivace v termostatu	po - pá	OV 596 200 357
šupiny kůže, nehtová drť, vlasy, vousy - průkaz dermatofytů	sterilní zkumavka, minimálně 15 částic	pokožová teplota	72 hod.	mikroskopie za 48 hod., kultivace 4-8 týdnů		denně	OV 596 200 357
<i>Pneumocystis jirovecii</i> - BAL, sputum indukované	sterilní zkumavka 30 ml (sputovka), 20 - 30 ml	2-8 °C	co nejrychleji	do 48 hod., pozitivní hlášení	pouze mikroskopická vyšetření	po - so	OV 596 200 357