



## Morfologická a mikroskopická diagnostika (metody přímého průkazu včetně kultivace)

TYP VZORKU	DOPORUČENÁ ODBĚR. SOUPRAVA	TEPLOTA ÚSCHOVY VZORKU DO TRANSPORTU DO LAB.	DOBA TRANSPORTU DO LAB.	DOBA ODEZVY	POZNÁMKA	PROVÁDÍ SE	KONTAKT
stolice na střevní parazity (vajíčka a larvy červů, cysty prvoků včetně kryptosporidií a mikrosporidií) (nutno uchovávat v chladu)	zkumavka 30 ml (sputovka)- i nesterilní, vhodné i vymyté lékovky	2-8 °C !	doručit co nejdříve v den odběru	24 - 48 hod.	odběr - asi 10 ml stolice (velikost vlašského ořechu), nejméně 3x s odstupem 2 - 3 dnů	denně	596 200 326
čerstvá stolice na amébozy a trofozoity jiných prvoků	zkumavka 30 ml (sputovka)- i nesterilní	chránit před vychlazením ! nejlépe 37 °C	doručit nejpozději do 30 minut po defekacínutno předem telefonicky domluvit	do 24 hod	nejméně 10 ml stolice (velikost vlašského ořechu)	denně	596 200 326
vyšetření na enterobiózu a vajíčka <i>Taenia</i> sp.	průhledná lepicí páska na podložním skle	bez teplotního omezení	bez časového omezení, opak. odběry dodat najednou	do 24 hod.	odběr ráno, přilepením na perianální kožní řasy bez předchozího omytí	denně	596 200 326
duodenální šťáva na trofozoity <i>Giardia intestinalis</i>	zkumavka 30 ml (sputovka)	37 °C	doručit nejpozději do 2 hod po odběrunutno předem telefonicky domluvit	v den doručení	2 - 5 ml šťávy, doporučujeme souběžně vyšetření stolice	denně	596 200 326
duodenální šťáva na <i>Strongyloides stercoralis</i> a <i>Ancylostoma duodenale</i>	zkumavka 30 ml (sputovka)	2-8 °C	doručit v den odběru nutno předem telefonicky domluvit	do 24 hod.	vhodné k vyloučení strongyloidózy při negativní stolici	denně	596 200 326
červi nebo jejich části - determinace	příměřená nádoba, přidat několik kapek vody	2-8 °C	doručit v den odběru s kapkou vody	do 24 hod.	nepřidávat fixační roztoky	denně	596 200 326
sputum na červy	zkumavka 30 ml (sputovka)	2-8 °C	doručit v den odběru nutno předem telefonicky domluvit	do 24 hod.	<i>Echinococcus</i> , <i>Paragonimus</i>	denně	596 200 326
moč na schistozomózu	zkumavka 30 ml (sputovka)	2-8 °C	urychlený transport nutno předem telefonicky domluvit	v den doručení	minimálně 20 ml	denně	596 200 326
krevní roztěr a tlustá kapka na malárii a na další krevní parazity	odmaštěná podložní skla protažená plamenem	pokoiová	doručit v den odběru	u akutních případů zpracováno ihnednutno předem telefonicky domluvit	odběry před transportem nechat dobře zaschnoutodběr provádět v době horečky, u podezření na filariózu nutno provést odběry v denních i nočních hodinách	denně	596 200 326
vaginální výtěr; a) barvený preparát (Giemsa-Romanowski; Gram) na <i>Trichomonas vaginalis</i> +MOP	sterilní podložní sklo	pokoiová	transport nejlépe v den odběru	3. den od doručení	nátěr sekretu na 2 skla nechat před transportem zaschnout	denně	596 200 326
vaginální výtěr: b) kulturační vyšetření na <i>Trichomonas vaginalis</i>	polotuhá transportní půda s tampónem pro kultivaci <i>Trichomonas vaginalis</i>	pokoiová	transport nejlépe v den odběru	3. den od doručení	čistě půdy skladovat při 4 - 8 °C, před odběrem nutno temperovat na pokoiovou teplotu	denně	596 200 326
ektoparaziti -determinace	zkumavka 30 ml (sputovka)	pokoiová	transport nejlépe v den odběru	3. den od doručení	nepoškozený celý objekt nedodávejte pouze části těla ektoparazitů	denně	596 200 326
Vyšetření na Acanthamoeby	domluvit s laboratoří objednání kulturačních ploten k seškrabu rohovky min. 2 dny dopředu	pokoiová	transport v den odběru	10 dní	čistě půdy skladovat při 4 - 8 °C, před odběrem nutno temperovat na pokoiovou teplotu	denně	596 200 326