

typ vzorku	doporučená odběr. souprava	teplota úschovy vzorku do transportu do lab.	doba transportu do lab.	min. doba odezvy	poznámka	provádí se	kontakt
stolice na střevní parazity (vajíčka a larvy červů, cysty prvoků včetně kryptosporidií a mikrosporidií) (nutno uchovávat v chladu)	zkumavka 30 ml (sputovka)- i nesterilní, vhodné i vymyté lékovky	2-8 °C !	doručit co nejrychleji v den odběru	24 - 48 hod.	odběr - asi 10 ml stolice (velikost vlašského ořechu), nejméně 3x s odstupem 2 - 3 dnů	denně	596 200 326
čerstvá stolice na amébozu a trofozoity jiných prvoků	zkumavka 30 ml (sputovka)- i nesterilní	chránit před vychlazením ! nejlépe 37 °C	doručit nejpozději do 30 minut po defekacinutno předem telefonicky domluvit	do 24 hod	nejméně 10 ml stolice (velikost vlašského ořechu)	denně	596 200 326
vyšetření na enterobiózu a vajíčka <i>Taenia</i> sp.	přůhledná lepící páska na podložním skle	bez teplotního omezení	bez časového omezení, opak. odběry dodat najednou	do 24 hod.	odběr ráno, přilepením na perianální kožní řasy bez předchozího omytí	denně	596 200 326
duodenální šťáva na trofozoity <i>Giardia intestinalis</i>	zkumavka 30 ml (sputovka)	37 °C	doručit nejpozději do 2 hod po odběrunutno předem telefonicky domluvit	v den doručení	2 - 5 ml šťávy, doporučujeme souběžné vyšetření stolice	denně	596 200 326
duodenální šťáva na <i>Strongyloides stercoralis</i> a <i>Ancylostoma duodenale</i>	zkumavka 30 ml (sputovka)	2-8 °C	doručit v den odběru nutno předem telefonicky domluvit	do 24 hod.	vhodné k vyloučení strongyloidózy při negativní stolici	denně	596 200 326
červi nebo jejich části - determinace	přiměřená nádoba, přidat několik kapek vody	2-8 °C	doručit v den odběru	do 24 hod.	nepřidávat fixační roztoky	denně	596 200 326
sputum na červy	zkumavka 30 ml (sputovka)	2-8 °C	doručit v den odběru nutno předem telefonicky domluvit	do 24 hod.	<i>Echinococcus</i> , <i>Paragonimus</i>	denně	596 200 326
moč na schistosomózu	zkumavka 30 ml (sputovka)	2-8 °C	urychlený transport nutno předem telefonicky domluvit	v den doručení	minimálně 20 ml	denně	596 200 326
krevní roztěr a tlustá kapka na malárii a na další krevní parazity	odmaštěná podložní skla protažená plamenem	pokojeová	doručit v den odběru	u akutních případů zpracováno ihnednutno předem telefonicky domluvit	odběry před transportem nechat dobře zaschnoutodběr provádět v době horečky, u podezření na filariózu nutno provést odběry v denních i nočních hodinách	denně	596 200 326
vaginální výtěr; a) barvený preparát (Giemsa-Romanowski; Gram) na <i>Trichomonas vaginalis</i> +MOP	sterilní podložní sklo	pokojeová	transport nejlépe v den odběru	3. den od doručení	nátěr sekretu na 2 skla nechat před transportem zaschnout	denně	596 200 326

vaginální výtěr: b) kulturační vyšetření na <i>Trichomonas vaginalis</i>	polotuhá transportní půda s tampónem pro kultivaci <i>Trichomonas vaginalis</i>	pokožová	transport nejlépe v den odběru	3. den od doručení	čisté půdy skladovat při 4 – 8 °C, před odběrem nutno temperovat na pokojovou teplotu	denně	596 200 326
ektoparazitě, příp. skladištní škůdci -determinace	zkumavka 30 ml (sputovka)	pokožová	transport nejlépe v den odběru	3. den od doručení	nepoškozený celý objekt nedodávejte pouze části těla ektoparazitů	denně	596 200 326
Vyšetření na Acantamoebý	domluvit s laboratoří objednání kultivačních ploten k seškrabu rohovky min. 2 dny dopředu	pokožová	transport v den odběru	10 dní	čisté půdy skladovat při 4 – 8 °C, před odběrem nutno temperovat na pokojovou teplotu	denně	596 200 326