


Odběr slin pro průkaz viru SARS-CoV-2 metodou PCR

Odběr slin se provádí pomocí soupravy DB-1221Saliva Collection Set 1.1IM (Diana Biotechnologies). Pro jednoho pacienta je 1 zkumavka, 1 trychtýřek a 1 šroubovací víčko.

POKYNY K ODBĚRU

!! PRO SPRÁVNÝ VÝSLEDEK TESTU...

...nejezte, nepijte, nežvýkejte žvýkačku a nekuřte 10 minut před odběrem.



Cílem je odebrat sliny do odběrové zkumavky.

- 1 Otevřete odběrovou sadu a našroubujte přiložený trychtýřek na odběrovou zkumavku.




- 2 **KUC - KUC - KUC**
Důležité: Několikrát zakašlejte do roušky.



- 3 V ústech nashromážděte větší množství slin a několikrát je poválejte zepředu dozadu.

- 4 Přiložte trychtýřek ke rtům a sliny do něj volně vypusťte. Je potřeba odebrat alespoň 1 cm tekuté části slin.

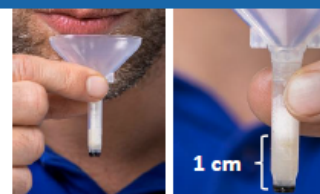

- 5 Odšroubujte trychtýřek a vyhoďte jej do odpadu. Zkumavku poté důkladně zašroubujte víčkem.



- 6 Zkumavku otřete dezinfekčním ubrouskem a odevzdejte.



Upozornění: Součásti odběrové sady neolizujte ani nevkládejte do úst.



Do doby transportu uchováváme v chladničce při 4-10°C. Skladování při 2-8°C je možné až 72hodin od odběru.

Největší výtěžnost má odběr v akutní fázi infekce.