

Postup třídění biologického materiálu pro transport na ZÚ Ostrava

Vzorky rozdělte podle teploty **pro transport**: 15 - 25°C (pokojová teplota), 2 - 8°C (lednice). Následně prosím předejte svozové službě.

Vzorky **před transportem** (max. do 24 hod.) uchovejte v **lednici** nebo při **pokojevé teplotě** (podle tabulky).

Tabulka

Transport co nejdříve, max. do 2 hod. 2 - 8°C				Teplota uchovávání před transportem do 24 hod.
Materiál	moč		plodová voda	2 - 8°C
	tkáň, kosti, biopsie, sekční materiál			
Vyšetření	Clostridioides difficile - antigen a toxin (stolice) Helicobacter pylori - antigen (stolice)			
Odběrová souprava	M.hominis a U.urealyticum - (výtěr, stěr) metabolicky			
Transport co nejdříve, max. do 2 hod. 15 - 25°C				Teplota uchovávání před transportem do 24 hod.
Materiál	krev, sérum	ejakulát mateřské mléko	vykultivovaný kmen (autovakcína)	2 - 8°C
	likvor	sputum, BAL	cizorodý materiál – katétry, kanyly klouby, elektrody a další	
	stolice	endotracheální aspirát	otisk z rány, popáleniny	
	hnis	nitrooční tekutina	voda na přítomnost mykobakterií	
	punktát	typizace parazita	CAPL, lidský genom	
Vyšetření	PCR – výtěr, stěr		virologie - kultivace	
Odběrová souprava				
Transport co nejdříve, max. do 2 hod. 15 - 25°C				Teplota uchovávání před transportem do 24 hod.
Materiál	hemokultury	výtěry, stěry (kultivace)	MOP (sklíčko)	15 - 25°C
	Uricult	tlustá kapka, krevní roztěr (sklíčko)	LEPEX (sklíčko)	
		kožní šupiny, nehty, vlasy, vousy		
Vyšetření	malárie, babézie - (tlustá kapka, krevní roztěr)		Akantaméby - (kultivace, Petriho miska s NN agarem)	
	QuantiFERON a T-SPOT TB (Li-heparin 7,5ml)		QuantiFERON TB Gold Plus	
Odběrová souprava				
	kultivace Trichomonas vaginalis		kultivace bakteriologie	
				
Vzorky pro biochemii a hematologii		Transport co nejdříve při teplotě 15 - 25°C		Uchovávání - nelze

Kontakt na Oddělení centrálního příjmu biologického materiálu ZÚ Ostrava (CP) – 596 200 461, 379

Kontakt na vedoucího oddělení CP- Mgr. Markéta Pomiklová – 603 980 122

Kontakt na vedoucí laborantku oddělení CP - Bc. Petra Chvějová – 733 743 075