



QuantiFERON-TB Gold Pxlus – pokyny k odběrům

Test QuantiFERON®-TB Gold-In-Tube

V diagnostické soupravě QuantiFERON®-TB Gold-In-Tube plus jsou používány u jednoho pacienta pro jednorázový odběr čtyř následujících odběrových zkumavek, které je nutno telefonicky objednat v laboratoři:

NIL kontrola (šedé víčko), TB Antigeny 1 a 2 (žluté a zelené víčko), Mitogen kontrola (fialové víčko)


1. U každého jedince odeberte **1 ml** ($\pm 0,2$ ml) krve ze žíly do každé **ze čtyř** odběrových zkumavek – adekvátní množství je po černou rysku, pokud není hladina krve blízko rysky, doporučujeme odebrat krev znovu.

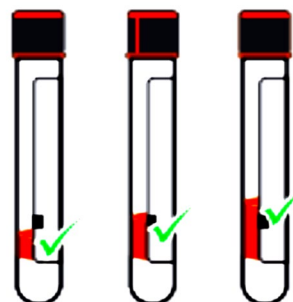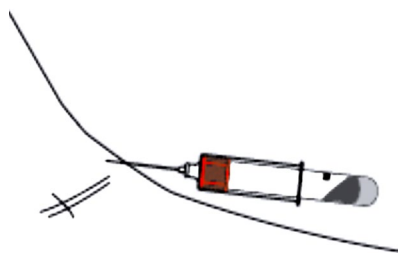

Krev je možno odebrat jakýmkoliv způsobem dle možností a zvyklostí zdravotnického zařízení. Propichovací zátka odběrových zkumavek umožňuje provádět odběr při použití různých pomůcek např. Vacutainer, motýlková jehla apod.

Dbejte všech opatření a zásad týkající se odběrů potenciálně infekčního materiálu!

2. Po odběru promíchejte obsah zkumavek opakovaným obrácením **10 x** dnem vzhůru, tak aby byl celý vnitřní povrch zkumavek pokryt krví.

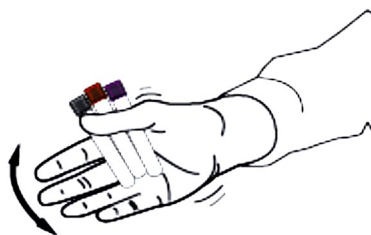

3. Zkumavky vhodně označte jménem pacienta a datem odběru.
Důležité!!! Při označování zkumavek nalepovacím štítkem, dbejte prosím na to, aby bylo možno kontrolovat hladinu odebrané krve!!!
4. Odebrané vzorky zašlete co nejdříve zpět do laboratoře spolu s vyplněnou žádankou.
Důležité!!! Po odběru skladujte a transportujte vzorky ve vertikální poloze víčkem vzhůru. Vzorky nechladi!!! Udržovat při pokojové teplotě a nejpozději do 8 hodin po odběru doručit do laboratoře, nejlépe bezprostředně po odběru!!!



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum klinických laboratoří

5. Alternativně je možno odebrat krev přímo do zkumavky s Li-Heparinem v množství min. 6 ml max. 8 ml (dospělí) min 2 max. 4ml (děti). Odebranou krev je nutno odeslat nejlépe **obratem do laboratoře (nejpozději do 8 hod)**! Upřednostňován je přímý odběr do čtyř speciálních zkumavek, tento alternativní postup je možný pouze v případě nutnosti akutního odběru, bez dostupnosti speciálních zkumavek.

ZKUMAVKY OBJEDNÁVEJTE A PO ODBĚRU ZASÍLEJTE NA:

Oddělení imunologie a alergologie

Laboratoř buněčné imunity

Tel.: 596 200 225

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Motlochová (596 200 240), Karin Siekelová (596 200 246)

KONZULTACE VÝSLEDKŮ: Mgr. Vít Ulmann

Laboratoř pro diagnostiku mykobakterií, tel.: 596 200 144 (220)