

Odběr biologického materiálu do virologického média pro izolaci virů

Biologický materiál:

- stěr, výtěr, biopsie, pitevni materiál – odebrat do virologického média
- sérum, plasma, likvor, stolice – lze odebrat do standardních odběrových souprav určených pro daný typ materiálu

Všechny vzorky musí být odebrány za sterilních podmínek!!!

Odběr vzorků do virologického média – postup:

Zkumavky s virologickým médiem jsou dlouhodobě skladovány zamražené. Pro odběr je nutné zkumavku s médiem nechat rozmrazit volně při pokojové teplotě (pro urychlení lze i pod teplou tekoucí vodou). Vhodným sterilním odběrovým tamponem z nylonu (dakronu) na flexibilní plastové tyčince se provede odběr klinického vzorku z příslušného místa potenciální infekce. Stěr provést intenzivně tak, aby bylo zachyceno pokud možno co nejvíce buněčného materiálu. Tampon vložit do virologického média, tyčinku zalomit o okraj zkumavky a uzavřít. Transportovat do laboratoře chlazené ideálně ihned.



Do doby transportu uchováváme v chladničce při 4-10°C.

Největší výtěžnost má odběr v akutní fázi infekce.

Zkumavky s virologickým médiem, tampony a žádanky rozesílá virologické odd.: tel.: 596 200 316, 312.

Oddělení virologie Ostrava: 596 200 316 (PhDr. Ivana Vidličková)